

NAVODILO ZA UPORABO



URGO FILMOGEL za herpes

Indikacije

Urgo Filmogel za herpes priporočamo za preventivo in kot pripomoček pri zdravljenju herpesa na ustnicah. Nanesti ga morate takoj, ko se pojavijo prvi simptomi (mravljiničenje ali pekoč občutek, srbenje) in nato z uporabo nadaljevati, vse dokler herpes popolnoma ne izgine.

Urgo Filmogel za herpes na površini tvori diskretni film, ki nudi zaščito in učinkuje na vse faze herpesa na ustnicah:

- blaži mravljiničenje ali pekoč občutek in srbenje
- omejuje rast herpesa in nastajanje mehurčkov in krast
- spodbuja celjenje in omejuje širjenje okužbe

Navodila za uporabo

Umijte kožo. S pomočjo aplikatorja za enkratno uporabo nanesite zadostno količino filmogela, da popolnoma prekrije herpes. Po nanosu boste morda čutili kratkotrajno mravljiničenje ali pekoč občutek. Pustite, da se suši približno 1–2 minuti. Čas sušenja je odvisen od količine nanesenega proizvoda.

Na vašem herpesu se bo ustvaril brezbarven film.

Filmogel morate uporabiti takoj, ko se pojavijo prvi simptomi (mravljiničenje ali pekoč občutek, srbenje) in nato do 4-krat na dan, da preprečite izbruh herpesa.

Filmogel uporabljajte tako pogosto, kot je potrebno, odvisno od stanja vaše kože in ustnic: 2 do največ 4 nanosi na dan. Z uporabo nadaljujte, vse dokler herpes popolnoma ne izgine.

Kontraindikacije

Ne nanašajte, če ima herpes premer, večji kot 1 cm, saj tak herpes potrebuje medicinsko oskrbo. Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino proizvoda.

Opozorila

Samo za zunanjo uporabo na ustnicah.

Pri nanosu lahko zaznate kratkotrajen pekoč občutek.

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 let.

Proizvoda ne nanašajte v bližino oči.

Izogibajte se stiku z očmi.

Po vsaki uporabi vsebnik dobro zaprite.

Aplikator je namenjen enkratni uporabi – ne uporabite ga ponovno.

Proizvoda ne smete zaužiti.

Med uporabo proizvoda oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne smete kaditi v bližini odprtega vsebnika. Proizvod je v tekočem stanju vnetljiv.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Če po 7 dneh uporabe proizvoda ne pride do izboljšanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Shranjevanje


Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Shranjujte ločeno od odprtega plamena ali virov vžiga ter pri temperaturi do 40 °C.

Sestavine

Derivati celuloze, mineralna kislina, karboksilna kislina, rastlinsko olje, alkohol in voda.



LAHKO VNETLJIVO

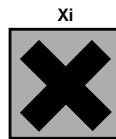

DRAŽILNO



0459

Laboratoires Urgo, 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France

Datum pridobitve CE oznake: 2009

Datum zadnje revizije navodila: januar 2011