

Virus Protect

STADA

pršilo proti navadnemu prehladu

OPIS PRIPOMOČKA

VirusProtect STADA je pršilo za usta proti navadnemu prehladu. Je enostaven za uporabo in začne hitro delovati. VirusProtect STADA prekrije sluznico v ustni votlini in ustvari zaščitno bariero pred virusi navadnega prehlada. Bariera ujame viruse navadnega prehlada, jih deaktivira in jim prepreči širjenje ter razmnoževanje.

INDIKACIJA

Za uporabo pri izpostavljenosti virusom prehlada ali zgodaj ob pojavu simptomov prehlada. VirusProtect STADA je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

NAMEN UPORABE

Zdravljenje in lajšanje navadnega prehlada.

KLINIČNE KORISTI

- VirusProtect STADA ščiti pred virusi navadnega prehlada.
- VirusProtect STADA lahko pomaga skrajšati trajanje navadnega prehlada, če se ga uporabi v zgodnji fazi okužbe.
- VirusProtect STADA lajša simptome navadnega prehlada in blaži boleče grlo.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ne uporabljajte izdelka VirusProtect STADA, če ste preobčutljivi/alergični na katerokoli sestavino.
- Izdelka ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem, saj klinični podatki niso na voljo.
- Brez posveta z zdravnikom izdelka ne uporabljajte po kirurških posegih v ustih in/ali grlu dokler se rane ne zacelijo.
- Pri uporabi pršila ne vdihavajte, saj lahko povzroči draženje dihalnih poti, kar vodi v kašelj in hripavost.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, da se izognete nezgodam z majhnimi delci.
- Če imate povišano telesno temperaturo ali če so vaši simptomi hujši kot pri običajnem navadnem prehladu, se posvetujte z zdravnikom, saj so le-ti lahko posledica česa drugega.
- Da se prepreči širjenje bolezni, naj izdelek uporablja le en uporabnik.

KONTRAINDIKACIJE

- Ni znanih kontraindikacij.

MOŽNI NEŽELENI UČINKI

- Ni znanih neželenih učinkov.

Če med uporabo izdelka VirusProtect STADA opazite nepričakovane učinke, se obrnite na zdravnika za nasvet.

NAVODILA ZA UPORABO

Kdaj uporabljati

Z uporabo izdelka VirusProtect STADA začnite ob morebitni izpostavljenosti virusom navadnega prehlada ali čim prej, ko opazite simptome navadnega prehlada. Z uporabo izdelka VirusProtect STADA nadaljujte, dokler se simptomi ne olajšajo.

Kako uporabljati

1. Odprite usta in nastavek (šobo) usmerite proti grlu (slika 1).
2. Prtisnite na pršilko in 2-krat razpršite (en odmerek) vsako drugo uro do 6-krat na dan v času, ko ste izpostavljeni virusu prehlada.



Slika 1

KAKO DELUJE

VirusProtect STADA vsebuje dve glavni sestavini, glicerol in tripsin iz trske, ki skupaj zagotavljata učinkovito bariero, ki deluje na tri načine:

Ujame: Glicerol ustvari osmotsko aktivno prehodno bariero, ki ujame viruse.

Deaktivira: Tripsin zavira zmogljivost virusov za vezavo in deaktivira njihovo zmogljivost okužbe celic.

Ščiti: Bariera izdelka VirusProtect STADA ščiti ustno votlino in grlo.



UJAME

DEAKTIVIRA

ŠČITI

VirusProtect STADA JE NA VOLJO V NASLEDNJEM PAKIRANJU:

- VirusProtect STADA 20 ml

PAKIRANJE IZDELKA VirusProtect STADA VSEBUJE:

- Pršilo za usta, ki ga sestavljajo plastenka, pršilka, nastavek (šoba) in zaščitni pokrov.
- Raztopina izdelka VirusProtect STADA vsebuje glicerol, vodo, naravni encim - tripsin iz trske, etanol (< 1 %), kalcijev klorid, trometamol in mentol. Raztopina je brez sladkorja in ne vsebuje konzervansov, glutena ali laktoze.
- To navodilo za uporabo.

RAVANJE IN SHRANJEVANJE

- Uporabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatlici.
- Shranjujte pri temperaturi 25 °C ali manj.
- Neuporabljen izdelek vrnite v lekarno.

POMEN SIMBOLOV



Preglej navodila za uporabo!



Zgornja omejitev temperature



Uporabno do



Številka serije



Referenčna številka



Proizvajalec



Pozor! Preglej navodila za uporabo!

Kontakt za Slovenijo:
Stada d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana



PROIZVAJALEC
Enzymatica AB
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund, Švedska
www.enzymatica.com

Več informacij na www.stada.si

ColdZyme®



101026 VirusProtect STADA 20 ml

MEDICINSKI
PRIPOMOČEK

CE
0477

9297214
2008
HR/SI
L001CS-01