



# Cicatridina<sup>®</sup>

## sprej



**SESTAVA:** aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimerinska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, natrijeva sol hialuronske kisline, butan, izobutan, propan.

**UPORABA:** dodatna pomoč pri celjenju površinskih in globokih ran (odrgnine, raztrganine, opekline, kirurške rane, preležanine in razjede).

**NAVODILO ZA UPORABO:** Pred vsako uporabo poškodovani predel skrbno očistite. ● **Za boljše mešanje prahu pred vsako uporabo vsebnik dobro pretresite, dokler ne zaslišite zvoka kroglic v notranjosti.** Med pršenjem držite pršilo navpično 10 do 15 cm od poškodbe. Pršite izključno na poškodovani predel. Postopek ponovite 2 - do 3 - krat na dan.

**PREVIDNOST OB UPORABI:** Uporaba kateregakoli izdelka, posebno dolgotrajna, lahko pri površinski uporabi poveča preobčutljivost. V takem primeru uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom o nadaljnji terapiji.

**KONTRAINDIKACIJE:** Če ste preobčutljivi za sestavine.

**F +**  
  
**ZELO LAHKO VNETLJIVO**

**OPOZORILO:** Vsebnik za pršilo je pod pritiskom. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Vsebnika ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50°C. Ne preklanjajte ali sežgite ga, niti ko je prazen. Ne pršite v odprt plamen ali žareče telo, hraniti izven dosega otrok. Izdelek ne vsebuje ozonu škodljivih snovi. Med uporabo ne kaditi. Izdelka ne smete zaužiti. Preprečiti stik z očmi. Preprečiti statično naelektrjenje. Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.

175 3 125 ml e

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

CE 0373

Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l. Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO), Italija (Italy)  
 Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec, Slovenija

LOT : EXP: ↓



SLO 23 REV 04  
04/2013



8